

GDT-Schnittstellenprotokoll Spirotrac V

Geräte Daten Träger - GDT - ist ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll für medizinische **Messgeräte und Arztpraxis-EDV-Systeme**.

Vitalograph Spirotrac V kann mittels GDT-Schnittstelle in alle gängigen Praxisverwaltungssysteme eingebunden werden. Unsere GDT-Schnittstelle wurde vom QMS (Qualitätsring Medizinischer Software) unabhängig zertifiziert.

Die Installation und/oder Einbindung sollte grundsätzlich, wie im Quick-Start-Guide beschrieben, durch den Praxis-EDV-Administrator erfolgen. Die Werte müssen lediglich in Ihr Patientenverwaltungssystem korrekt eingegeben werden:

Satzartvarianten:	6302, 6310, 6311
GDT-ID des Empfängers:	LUFU (FK 8315)
GDT-ID des Senders:	EDV1 (FK 8316)
GDT-Version:	02.10 (FK 9218)
	FK für Importfilter
Programmaufruf:	(Installationsverzeichnis Spirotrac V) Spirotrc.exe / edv
Arbeitsverzeichnis:	GDT-Dateispeicherort

Das Arbeitsverzeichnis kann in Spirotrac V unter Extras → Optionen → GDT → Konfiguration ausgewählt werden.

Die PDF-Übergabe kann unter Extras → Optionen → GDT ausgewählt werden. Durch Setzen des Häkchens bei PDF-Bericht wird in der GDT-Datei durch die Kennung 6305 der Speicherort der PDF-Datei erstellt.

Dateiendungen sind nach GDT-Spezifikation von 001 - 999 möglich:
LUFUEDV1.001 – LUFUEDV1.999, **EDV1LUFU.001** – EDV1LUFU.999

Spirotrac V muss aus der Arztpraxis-EDV mit dem Parameter /edv gestartet werden.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen unser Support gern unter +49 40 547391-14 oder support@vitalograph.de zur Verfügung.

Stand: Februar 2011
Vitalograph GmbH

