

Anleitung zur Behebung der Druckprobleme in Vitalograph Reports durch Microsoft Update KB5006670


Hinweis: Sie benötigen Administrator-Rechte, um die Bug-Fix-Datei auszuführen.

Loggen Sie sich als Benutzer mit Administrator-Rechten ein.


Stellen Sie sicher, dass Vitalograph Reports geschlossen ist.

Laden Sie die Bug-Fix-Datei herunter.

Navigieren Sie zur heruntergeladenen Datei. Der Standard-Ordner dafür ist Downloads:

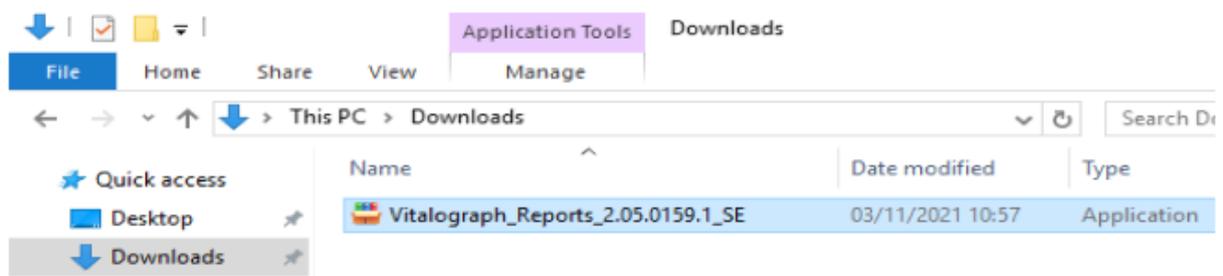

Führen Sie die Bug-Fix-Datei durch Doppelklick aus:

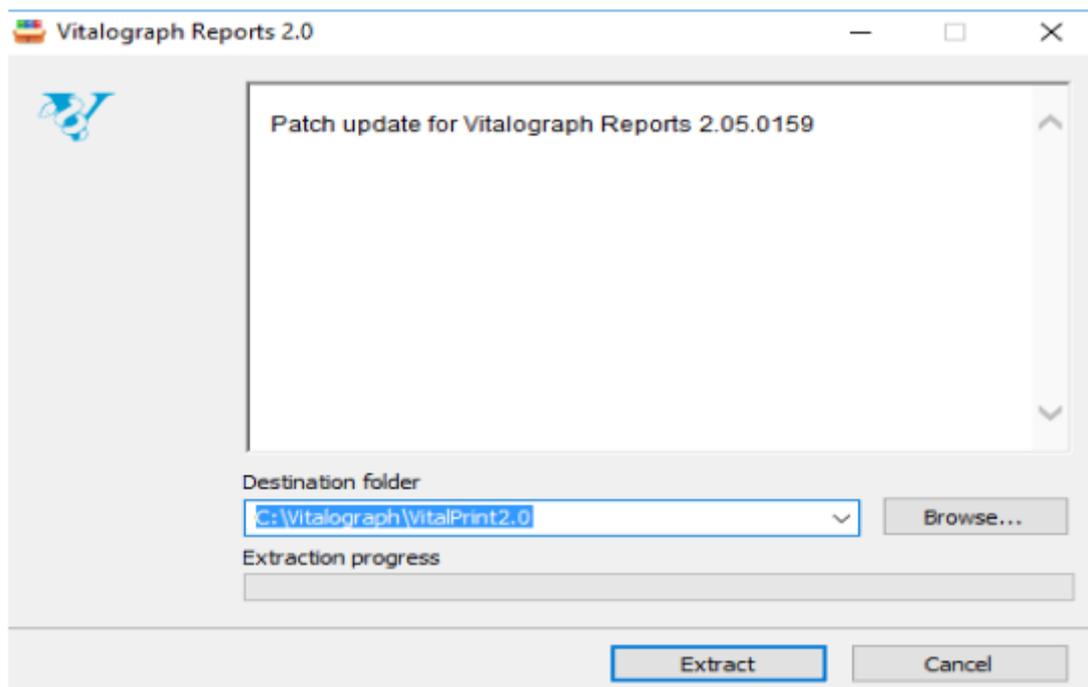

Hinweis: Der Ziel-Ordner (Destination folder) muss der Speicherort sein, in dem Vitalograph Reports installiert ist. Der Standard-Ordner dafür ist C:\Vitalograph\VitalPrint2.0. Um einen anderen Speicherort auszuwählen, klicken Sie auf Browse... und navigieren Sie zum Installationsverzeichnis von Vitalograph Reports.

Wählen Sie Extract

Sobald der Vorgang beendet ist, wird das Fenster automatisch geschlossen.